




Повязка абсорбирующая
OPSITE Post-Op
Влагостойкая и
бактерионепроницаемая
повязка с ячеистой
гигроскопической
прокладкой

Одноразовое использование.
Стерилизовано этиленоксидом.
Повторная стерилизация запрещена.
Хранить в сухом месте (<25°С/77°F).
Бережь от попадания солнечных лучей.
Описание
OPSITE Post-Op Visible представляет собой влагостойкую и бактерионепроницаемую повязку с ячеистой гигроскопической прокладкой.
Механизм действия
Повязка OPSITE Post-Op Visible имеет трехслойную структуру, которая сочетает взаимодействующий с раной слой с низкой адгезией, водо- и бактерионепроницаемую прокладку из губки и влагостойкую пленку с высокой паропроницаемостью. Пленка не пропускает жидкости и бактерии и, пока повязка находится

в неповрежденном виде, защищает раневую область от внешних загрязнений. Ячеистая структура водо- и бактерионепроницаемой прокладки из губки обеспечивает постоянную визуализацию раневой области и окружающей кожи без смены повязки. Более того, она может легко накладываться с использованием асептической техники и уменьшать болевые ощущения при снятии благодаря особым образом распределенному клеящему веществу.
Инструкции по использованию
Очистите и тщательно высушите зону нанесения в соответствии со стандартными процедурами.
А. Выньте повязку из внешней упаковки. Частично снимите белую/оранжевую бумажную подложку, отмеченную

цифрой 1.
В. Удерживая за неприлипающие концы повязки, аккуратно разместите повязку над желаемой областью. Полностью снимите бумажную подложку.
С. Разгладьте повязку на желаемой области, применив небольшое давление, особенно по краям, и убедившись, что прокладка из губки не сжата. Используя небольшой выступ, начните аккуратно снимать верхний слой, отмеченный цифрой 2.

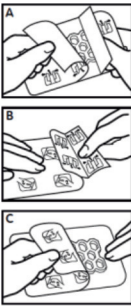

Расправьте и выровняйте повязку.
Снятие
Для снятия повязки аккуратно удерживайте повязку на месте, одновременно захватывая один угол повязки и приподнимая его, а затем удаляя пленку параллельно коже. Остановитесь, а затем повторите процесс.
Показание
Для закрытия ран, таких как послеоперационные раны, глубокие порезы, садины, царапины и небольшие ожоги, при котором уровень экссудата является низким/средним.
Меры предосторожности
Используйте только на сухой коже, подготовленной в соответствии со стандартными процедурами. Не используйте повязки поверх друг друга

и не перекрывайте их. Периодически осматривайте повязку и раневую область, чтобы подтвердить, что повязка надежно закреплена, особенно после принятия душа или если повязка намокает. Если повязка отклеилась, используйте новую повязку. Как и в случае со всеми клейкими продуктами, используйте и снимайте очень осторожно с чувствительной или слабой кожи. Давление, применяемое к повязке в результате непосредственной массы тела, может привести к кратковременному травмированию или следам вдавливания на коже в виде рисунка ячеистой прокладки из губки. При снятии повязки небольшой рельефный отпечаток ячеистой прокладки из губки может быть заметен на коже. Такой эффект является

нормальным и должен пройти через несколько часов. OPSITE Post-Op Visible является продуктом одноразового использования. При использовании несколькими пациентами может возникнуть перекрестное загрязнение или заражение. Открытие упаковки повязки нарушает систему защиты стерильности, поэтому любая неиспользуемая повязка не должна храниться для использования в более позднее время.
Противопоказания
Не используйте повязку под компрессионными повязками или одеждой.

Доступность продукции	
Код	Размер
66800136	10 см x 8 см / 4 дюйма x 3 1/8 дюйма
66800137	15 см x 10 см / 6 дюймов x 4 дюйма
66800138	20 см x 10 см / 8 дюймов x 4 дюйма
66800139	25 см x 10 см / 10 дюймов x 4 дюйма
66800140	30 см x 10 см / 11 ¾ дюймов x 4 дюйма
66800141	35 см x 10 см / 13 ¾ дюймов x 4 дюйма

Доступность
Коробка из 20 штук
Коробка из 20 штук
Коробка из 20 штук
Коробка из 20 штук
Коробка из 20 штук
Коробка из 20 штук

АВСТРАЛИЯ
Smith & Nephew Pty Ltd85 Waterloo RoadNorth Ryde NSW 2113PO Box 393 North Ryde BC NSW 1670 Tel: +61 2 9857 3999
АВСТРИЯ
Smith & Nephew GmbHConcorde Business Park C3Österreich A-2330 Schwechat Tel: +43 1 70 79102
БЕЛЬГИЯ
Smith & Nephew S.A.-N.V.Hector Henneaulaan 3661930 Zaventem Tel: +32 2 702 2911
КАНАДА
Smith & Nephew Inc.2280 Argentia RoadMississauga, ON L5N 6H8 Tel: 1 800 463 7439
КИТАИ
Smith & Nephew Ltd. 12F Headquarters Building, 168 Xizang Road (M), Huangpu

District Shanghai 200001 Tel: +86 21 2330 3000
ДАНИЯ
Smith & Nephew A/S Slotsmarken 142970 Høersholm Tel: +45 4580 6100
НИДЕРЛАНДЫ
Smith & Nephew B.V.PO Box 5252130 AM Hoofddorp Kruisweg 637, 2132 NB Hoofddorp Tel: (+31) (0) 20 6543999
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Smith & Nephew Limited PO Box 442 Shortland Street Auckland 1140 Tel: +64 9 828 4059
НОРВЕГИЯ
Smith & Nephew A/S PO Box 224 Nye Vakkås vei 641379 Nesbru Tel: 66842020
ПАКИСТАН
BSN Medical (PVT) Ltd A/69 SITE Manghopir Road PO Box 3659 Karachi 75700, Pakistan Tel: +92 21 32561176-77

ПОЛЬША
Smith & Nephew Sp. Z o.o Ul. Marynarska 1502-674 Warszawa Tel: +48 22 360 41 20
ПОРТУГАЛИЯ
Smith & Nephew, Lda. Estrada Nacional nº 10, Km 131Parque Tejo - Bloco C 2625-445 Forte da Casa Portugal Tel: +351 21 4 46 06 50
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
Smith & Nephew GmbH Concorde Business Park C3 A-2320 Schwechat Tel: +43 (0)1 707 91 02.
ФИНЛЯНДИЯ
Smith & Nephew Oy Äyritie 12 C 01510 Vantaa Tel: +358 207 866 300
ФРАНЦИЯ
Smith & Nephew SAS 25 bd Alexandre Oyon 72019 Le Mans Cedex 2 Tel: +33 02 43 83 23 23
ГЕРМАНИЯ

Smith & Nephew GmbH Friesenweg 4/ Haus 21 22763 Hamburg Tel: +49 040 879744 0
ГРЕЦИЯ
Costas A. Papaellinas (Hellas) SA 26th km, Paeanias - Markopoulou Ave PO Box 18219400 Koropi Tel: 662 6201-7
ГОНКОНГ
Smith & Nephew Ltd Unit 813-816, 8/F Delta House 3 On Yiu Street Shatin N.T. Tel: (852) 2648 7700
СИНГАПУР
Smith & Nephew Pte Ltd. 1A International Business Park #09-03 Tolaram 609933 Tel: (+65) 6270 0552
ЮЖНАЯ АФРИКА
Smith & Nephew (Pty) Ltd. 30 The Boulevard West End Office Park Westville, 3629 Tel: 031 2428111
ИСПАНИЯ

Smith & Nephew SAU Fructuós Gelabert, 2-4 08970 Sant Joan Despí Barcelona Tel: 93 373 73 01
ШВЕЦИЯ
Smith & Nephew AB PO Box 143 Kråketorpsgatan 20 43122 Mölndal Tel: 031-746 58 00
ШВЕЙЦАРИЯ
Smith & Nephew AG Glutz Blotzheim-Str. 1 CH-4502 Solothurn Tel: 32 624-5660
ИНДИЯ
Smith & Nephew Health Care Pvt. Ltd. B-501-509, Dynasty Business Park Andheri-Kurla Road, Andheri East, Mumbai – 400059 Tel: 022 4005 5090
ИРЛАНДИЯ
Smith & Nephew Limited 4045 Kingswood Road Citywest Co. Dublin Tel: 1 890 76 36 36
ИТАЛИЯ

Smith & Nephew S.r.l. Via De Capitani 2A 20864 Agrate Brianza Tel: 800 393 060
ЯПОНИЯ
Smith & Nephew Wound Management KK 2-4-1 Shiba Park, Minato-ku Tokyo 105-0011, Japan Tel: 03-5403-8930
КОРЕЯ
Smith & Nephew Ltd 13F, ASEM Tower 517 Yeongdong-daero Gangnam-gu, Seoul, Korea (135-798) Tel: 2 6001 7575
ТАЙВАНЬ (КИТАЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
Smith & Nephew (Overseas) Ltd Taiwan Branch 9F-2, No. 50, Sec 1 Xincheng South Road Taipei City Tel: 886 2 3322 5020
ТАЙЛАНД
Smith & Nephew Ltd 16th Floor Building A The 9th Towers Grand Rama 9 33/4 Rama 9 Road Huaykwang Sub-District Huaykwang District, Bangkok

10310 Tel: 66(0)2-116-5581
ТУРЦИЯ
Smith ve Nephew Medikal Cihazlar Tic. LTD. Şti. Bahçeköy Mah. Orkide Sokak No:8/E 84473 Sarıyer Istanbul Tel: +90 212 226 22 55
МАЛАЙЗИЯ
Smith & Nephew Healthcare Sdn. Bhd Suite 11.01B & 11.02, Level 11 Menara AmFIRST, No 1 Jalan 19/3 46300 Petaling Jaya Selangor Tel: +603-7958 7103
МАЛЬТА
Cherubino Ltd Delf Building, Sliema Road Gzira Tel: 21 343270
МЕКСИКА
Smith & Nephew, SA de CV Patricio Sanz No. 442 Colonia del Valle, C.P. 03100 Mexico D.F. Tel: 53 40 22 60
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Smith & Nephew FZE 4th Floor National

Bank of Abu Dhabi Building Al Jazari Building 47 Dubai Healthcare City -District 8 PO Box 9715 Dubai, U.A.E. Tel: 971 4 4299111
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
Smith & Nephew Healthcare Ltd. Healthcare House 101 Hessele Road Hull, HU3 2BN Tel: +44 01482 222 200
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Smith & Nephew, Inc. Advanced Wound Management 3909 Hulen Street Fort Worth, TX 76107 Customer Care Center: 1 800 876 1261
ВЕНЕСУЭЛА
Ace Sales Corp 8085 NW 68th Street Miami, Florida 33166 Tel: 305 835 0310

Производитель
 Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessele Road, Hull HU3 2BN, Англия
™ Торговые марки Smith & Nephew
©Smith & Nephew Дата выдачи 12/2013

