

Описание

Повязка ALLEVYN Non-Adhesive сочетает абсорбирующий губчатый слой расположенный между неприлипающим перфорированным контактным слоем с наружной полупроницаемой пленкой.

Механизм действия

Повязка ALLEVYN Non-Adhesive способствует поддержанию оптимальной влажной среды в области раны среды. Повязку легко накладывать и удалять. Отсутствие адгезивного компонента позволяет применять повязку на чувствительной коже.

Показания к применению

Ведение неглубоких гранулирующих ран, заживающих вторичным натяжением, хронических и острых экссудующих ран, как глубоких, так и поверхностных, таких как

пролежни, трофические венозные язвы, инфицированные раны, диабетические язвы стоп, малигнизированные язвы, хирургические раны, ожоги первой и второй степени, донорские участки при пересадке кожи и грибковые язвы. В некротических и гнойно-фибринозных ранах повязка ALLEVYN Non-Adhesive может использоваться совместно с гелем INTRASITE™. Повязка ALLEVYN Heel способствует снижению давления на рану и используется совместно с антипрессорными устройствами в рамках протокола лечения пролежней.

Меры предосторожности

Не применяйте повязки ALLEVYN NonAdhesive вместе с такими окислителями, как растворы гипохлорита (например, EUSOL (ЭУСОЛ)) или перекиси водорода, поскольку они могут

вызывать распад абсорбирующего полиуретанового компонента повязки. Гиперемия кожи вокруг раны послеприменения ALLEVYN Non-Adhesive наблюдалась редко. В одних случаях это связано с раздражением чувствительной кожи, в других причиной может стать продолжительный контакт раневого эксудата со здоровой кожей. Были зафиксированы редкие случаи гиперчувствительности пациентов к повязке. Запрещается использовать ALLEVYN Heel для лечения пролежней без антипрессорных устройств. ALLEVYN Heel – это продукт для однократного использования. Применение повязки для лечения ран другого пациента может вызвать перекрёстное заражение или развитие инфекции. Вскрытие упаковки нарушает

стерильность повязки, поэтому нельзя откладывать наложение вскрытой повязки на другой день.

Инструкция по применению

- 1 Очистите рану в соответствии с клиническими правилами.
- 2 Выберите повязку подходящего размера.
- 3 Подготовьте и очистите кожу вокруг раны путем удаления избыточного эксудата. Удалите волосы вокруг раны, чтобы повязка хорошо прилегала к раневой поверхности.
- 4 Наложите ALLEVYN Non-Adhesive белой поверхностью на рану и укрепите фиксирующей пленкой (например, OPSITE™ Flexifix), пластырем или бинтом. ALLEVYN Non-Adhesive может использоваться для лечения венозных трофических язв совместно с

компрессионной терапией.

- 5 При необходимости ALLEVYN NonAdhesive можно обрезать для придания ей оптимальной формы на частях тела сложного рельефа.
- 6 ALLEVYN Non-Adhesive можно использовать в сочетании с другими методами лечения, например, с компрессионной терапией, под наблюдением врача. При компрессионной терапии повязку необходимо обрезать под размер раны.

Частота смены повязки

В начальных фазах лечения раны ревизия повязки ALLEVYN Non-Adhesive должна производиться часто. Повязку можно оставлять на месте до 7 дней или до тех пор, пока видимая граница эксудата не достигнет 1,5 см от края повязки. При этом

необходимо соблюдать правила ведения подобных ран. Водонепроницаемая пленка на наружной поверхности повязки препятствует бактериальной контаминации раны. ALLEVYN Non-Adhesive может использоваться при лечении инфицированных ран под наблюдением врача.

Удаление повязки

Для удаления повязки снимите фиксирующую повязку или бинт и аккуратно удалите ALLEVYN Non-Adhesive с поверхности раны.

Ассортимент	Размер	Штук в упаковке
Код	Пятка	5
66000730	Пятка	10
66000773	Пятка	

СТЕРИЛЬНО

Хранить в сухом месте при температуре не выше 25°C ($77^{\circ}\text{F}</math>). Предназначено только для одноразового использования. Для ран со средней и высокой степенью экссудации. Внимание! Беречь от солнечных лучей. Радиационный метод стерилизации. Не использовать повязку из открытой или поврежденной упаковки. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.$

Производитель

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hesse Road, Hull HU3 2BN, Англия
™ Торговые марки Smith & Nephew
©Smith & Nephew Дата выдачи 12/2013

Уполномоченный представитель в России:

ООО Смит энд Непью, 105120 Москва, 2-й Сыромятинский переулок, д.1, эт.9, пом.1, ком.1
Тел: +7 495 755 55 03

297NT46607 RU_Jul17



0086