



## OPSITE® POST-OP

Водонепроницаемые абсорбирующие повязки

**СТЕРИЛЬНО** **EO**



Для одноразового использования.

Стерилизовано окисью этилена. Не используйте, если упаковка открыта или повреждена. Хранить в сухом месте (<25 °C). Беречь от солнечных лучей.

### Описание

Повязки OPSITE являются водонепроницаемыми, что позволяет принимать душ. Пленка является непроницаемой для микроорганизмов, а впитывающая подушечка повязки является стерильной, чтобы снизить риск инфицирования. Повязка изготовлена из сверхтонкой воздухопроницаемой пленки, которая изгибается при движении.

### Показания

Водонепроницаемые повязки OPSITE предназначены для использования при порезах, ссадинах и хирургических швах.

### Меры предосторожности при использовании

Немедленно обращайтесь к врачу в случае любых серьезных ран и ожогов, а также при возникновении покраснения или дискомфорта. Как и в случае применения других адгезивных повязок, накладывайте и снимайте осторожно, чтобы не допустить повреждения чувствительной или слабой кожи.


### Инструкция по применению

1. Вымойте руки до и после обработки раны.
  2. Осторожно очистите и высушите рану и окружающую кожу.
- Примечание. Остановите кровотечение (при необходимости используйте давление) и убедитесь, что кожа вокруг раны абсолютно сухая.
3. Извлеките повязку из упаковки.
  4. Снимите верхний бумажный слой, обозначенный «1».
  5. Наложите повязку с легким прижатием.
  6. Снимите второй бумажный слой, обозначенный «1» и разгладьте повязку.
  7. Снимите верхнюю оболочку, обозначенную «2».
  8. Удаление: Чтобы снять повязку, поднимите один угол и медленно растяните пленку параллельно коже.

### Уход за повязкой

Эта повязка может быть оставлена на несколько дней, пока она защищает рану и хорошо держится. Смените повязку, если:

- она начинает протекать или больше не держится;
- она повреждена.

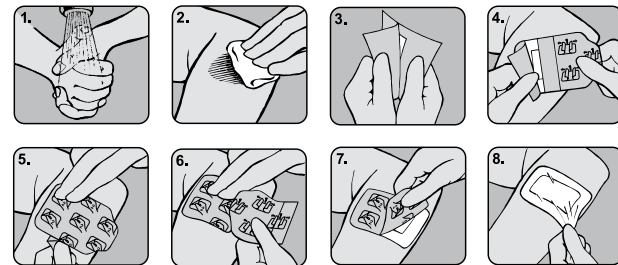

### Производитель

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road,  
Hull HU3 2BN, England  
™ Торговые знаки Smith & Nephew ©Smith & Nephew  
Дата выпуска 12/2014 [www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)