



CUTICERIN[◊]

Повязка абсорбирующая с низкой адгезивной способностью

СТЕРИЛЬНО



Стерилизовано гаммаизлучением.

Не использовать, если упаковка открыта или повреждена. Только для одноразового использования. Не стерилизовать повторно. Хранить в сухом месте (<25 °C/77 °F).

Описание

CUTICERIN изготовлена из гладкой ацетатной ткани с определенным размером ячеек и гидрофобным покрытием на основе вазелина, парафина и ланолинового спирта (EUCERITE™).

Показания

В качестве контактного слоя при поверхностных экссудирующих ранах, таких как:

- ожоги;
- радиационные поражения;
- ссадины;
- участки взятия расщепленного кожного лоскута.

Противопоказания

Не используйте для пациентов с известной аллергией на один из следующих компонентов:

- вазелин;
- парафин;
- ланолин.

Меры предосторожности

Нет.

Характеристики

- Низкая адгезия по отношению к дну раны.
- Сводит к минимуму боль при смене повязки.
- Снижает риск врастания грануляционной ткани в повязку.
- Проницаемая для воздуха и экссудата.

Инструкция по применению

1. Снимите защитный слой.
2. Возьмите повязку пинцетом или рукой в перчатке.
3. Ровно наложите повязку на рану.
4. Используйте абсорбирующий материал для удаления излишнего экссудата, если необходимо.

5. Фиксация повязки бинтом или клеящим материалом.

Доступность продукта

Код	Размер	Доступность
66045560	7,5 см x 7,5 см / 3 дюйма x 3 дюйма	50 шт. в коробке
66045561	7,5 см x 20 см / 3 дюйма x 8 дюймов	50 шт. в коробке
66045562	7,5 см x 7,5 см / 3 дюйма x 3 дюйма	10 шт. в коробке
66045563	7,5 см x 20 см / 3 дюйма x 8 дюймов	10 шт. в коробке
66045503	7,5 см x 20 см / 3 дюйма x 8 дюймов	25 x 3 шт. в коробке
66045564	10 см x 10 см / 4 дюйма x 4 дюйма	10 шт. в коробке
66045502	20 см x 40 см / 8 дюймов x 16 дюймов	25 шт. в коробке

Производитель

Smith & Nephew Medical Ltd,
101 Hessle Road, Hull, HU3 2BN, England
™ Торговые знаки Smith & Nephew ©Smith & Nephew
Дата выпуска 12/2014 www.smith-nephew.com