



IV3000^o PORTED

Водонепроницаемая пленочная повязка для фиксации катетера с полосками для фиксации и контрольной биркой



Для одноразового использования.
Стерилизована окисью этилена.

Не используйте, если упаковка открыта или повреждена. Хранить в сухом месте (<25 °C/77 °F). Беречь от солнечных лучей.

Описание

IV3000 — это водонепроницаемая прозрачная пленочная повязка, специально предназначенная для фиксации катетера и защиты места внутривенного введения.

Механизм действия


Запатентованная пленка REACTIC™, входящая в состав пластыря IV3000 имеет уникальную молекулярную структуру, которая значительно более проницаема для паров воды, нежели обычные пленки. Пленка непроницаема для жидкостей, бактерий и вирусов, обладает водозащитными свойствами, и в интактном состоянии препятствует бактериальной контаминации в области стояния внутривенного катетера за счет более сухой среды, меньшей мацерации кожи, что снижает риск катетер-ассоциированной инфекции. IV3000 легко и асептично накладывается и удаляется. Уникальный сетчатый рисунок нанесения клеящего вещества позволяет безболезненно снимать пластырь. IV3000 покрыт раздражающим и несенсибилизирующим клеящим составом. Повязка также снабжена стерильными фиксирующими полосками и контрольными бирками.

Инструкция по применению

Очистите и тщательно высушите область наложения в соответствии со стандартными процедурами.

- 1. Снимите фиксирующие полоски с печатной бумажной подложки (1) и наложите соответствующим образом, убедившись, что полоски не закрывают место введения катетера. Полоски могут использоваться на крыльях или основании катетера для повышения безопасности, а также для закрепления трубок или стабилизации катетера. Снимите подложку (1) с повязки.
- 2. Снимите защитную бумагу (2) в направлении, указанном на схеме.
- 3. Наложите повязку. Отверстие в повязке для введения катера должно совпадать с портом катетера.
- 4. Приклейте часть повязки с клейкой пленкой на катетер, создавая минимум складок.

- 5. Снимите прозрачную печатную подложку (3), подняв неклеящий язычок в конце повязки и потянув его диагонально до полного удаления подложки.
- 6. Удалите оставшуюся бумажную защиту (4) и приклейте тканевые части повязки на крылья катетера.
- 7. Расположите пленку вокруг катетера, чтобы завершить наложение повязки.
- 8. В соответствии с местными клиническими протоколами информация может быть записана шариковой ручкой на контрольной бирке перед снятием с подложки (1) и затем помещена в историю болезни пациента, на кожу или на повязку (не закрывая обзор места установки катетера).
- 9. При использовании более чем одной повязки не допускайте перекрытия повязок.
- 10. Снимайте повязку, сняв тканевую часть повязки, а затем освободив пленку, растягивая ее параллельно коже пациента и одновременно удерживая кожу пациента и катетер другой рукой. Также можно использовать спирт, чтобы разрушить клеящий слой. В случае особенно чувствительной кожи для нарушения адгезии можно использовать теплую воду и мыло, а затем осторожно снять повязку.

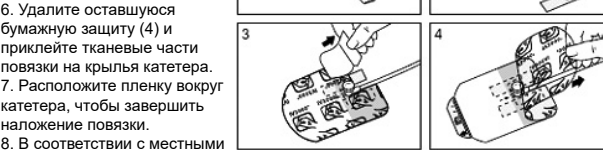

Показания
Вышеуказанный продукт подходит для фиксации катетеров с портом.

Противопоказания
Повязка IV3000 должна использоваться только в местах внутривенного введения. Если требуется пленочная повязка для открытых ран, таких как пролежни, ожоги или донорские участки, следует использовать OPSITE™ FLEXIGRID™. Фиксирующие полоски и контрольная бирка не предназначены для

использования в качестве замены швов и других первичных методов закрытия ран.

Меры предосторожности

Используйте только на подготовленной сухой коже. Не накладывайте повязки друг на друга и не допускайте перекрытия повязок. Периодически проверяйте место повязки и катетера, чтобы удостовериться, что фиксация является надежной и вливание происходит непрерывно и надлежащим образом, в особенности после принятия ванны или душа или намокания места повязки и катетера. Если повязка отсоединится, убедитесь, что катетер установлен правильно, а затем наложите новую повязку. Как и в случае других клеящихся изделий, накладывайте и снимайте осторожно, чтобы не допустить повреждения чувствительной или слабой кожи. В случае покраснения или повышения чувствительности прекратите использование.

IV3000 — это продукт для одноразового использования. В случае использования более чем для одного пациента может возникнуть перекрестное заражение или инфекция. При открытии упаковки нарушается стерильная защита, соответственно, неиспользованные повязки не должны храниться для будущего использования.

Другие доступные продукты IV3000

Код	Размер	Показание	Доступность	С отверстием.
4007	6 cm x 7 cm / 2 3/8 дюйма x 2 3/4 дюйма	Периферийные катетеры	Коробка 100 шт.	Нет.
4008 т	10 cm x 12 cm / 4 дюйма x 4 3/4 дюйма	Центральные катетеры	Коробка 50 шт.	Нет.
66004005	10 cm x 12 cm / 4 дюйма x 4 3/4 дюйма	Центральные катетеры	Коробка 10 шт.	Нет.

Доступность продукта				С отверстием.
Код	Размер	Показание	Доступность	
66004011	5 cm x 6 cm / 2 дюйма x 2 3/8 дюйма	Периферийные катетеры	Коробка 100 шт.	Да.
4006	7 cm x 9 cm / 2 3/4 дюйма x 3 1/2 дюйма	Периферийные катетеры	Коробка 100 шт.	Да.
66004009	9 cm x 12 cm / 3 1/2 дюйма x 4 3/4 дюйма	Периферийные и центральные катетеры	Коробка 50 шт.	Да.
66800512	11 cm x 14 cm / 4 5/16 дюйма. x 5 1/2 дюйма	Устанавливаемые периферийно центральные катетеры	Коробка 25 шт.	Да.

Производитель

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, England
™ Торговые знаки Smith & Nephew ©Smith & Nephew Дата выдачи 11/2014
www.smith-nephew.com

